


PREZA-PAK II

Arterial Blood Sampler


PREZA-PAK II Arterial Blood Sampler For In-Vitro Diagnostic Use

Syringe untuk pengambilan sampel analisa gas darah

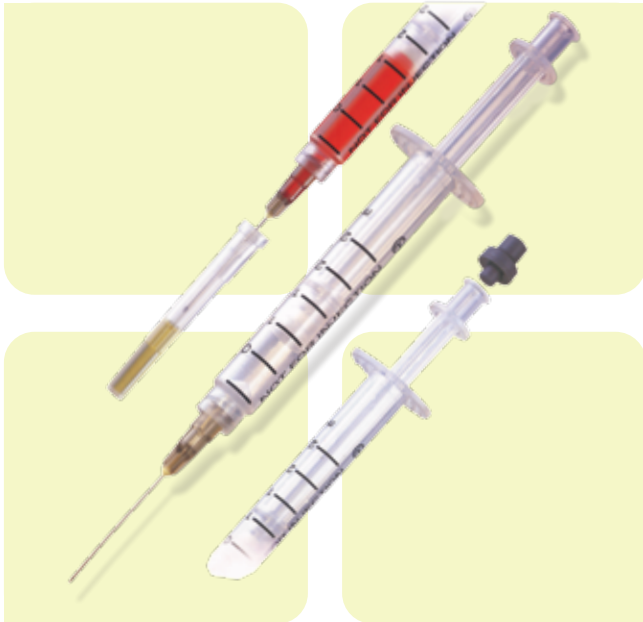

- Penggunaan Lithium Heparin untuk mencegah pembekuan dan menjamin akurasi hasil analisa.
- Penggunaan gel pada penutup jarum mencegah masuknya udara dari luar sehingga hasil analisa lebih akurat.

Cara Penggunaan (Metode Non Aspirasi)

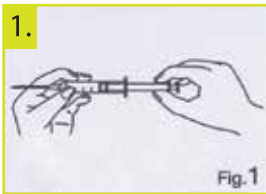

- Hubungkan dengan jarum untuk koleksi sampel darah.
- Tarik plunger untuk menentukan jumlah darah yang diinginkan.



- Sterilisasi bagian kulit yang akan ditusuk dan lakukan penusukan dengan arah 45°-90°.
- Tutup segera dengan gel penutup jarum.
- Campur darah dan heparin dengan memutar sekitar 50 kali.

Note :

- Digunakan untuk diagnostik analisis gas darah secara in vitro.
- Jika sampel tidak segera digunakan simpan sampel dalam lemari pendingin.

Dua Metode Aspirasi



Jika menggunakan metode non aspirasi maka ujung plunger tidak perlu ditutup dengan penutup.



Jika menggunakan metode aspirasi (seperti proses pengambilan darah biasa) maka ujung plunger harus ditutup dengan penutup yang tersedia.

“Tahapan pra-analitik memberikan kontribusi yang sangat besar pada pemeriksaan laboratorium. PREZA-PAK II, dilengkapi dengan teknologi Terumo terbaik yang dapat mengoptimalkan tahapan pra-analitik pada pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD)”



PT. TERUMO INDONESIA

Wisma Keiai 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.3, Jakarta 10220

Telp.: (021) 572 4071 (Hunting), Fax.: (021) 572 4072

Distributor: PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
Graha Atrium 12th Floor, Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta 10410
Phone: (021) 3456008 (Hunting), Fax: (021) 3456088

Cabang-cabang:

Jakarta (021) 460 9343, 460 3975
Tangerang (021) 53152230
Bogor (0251) 658658, 650275/76
Bandung (022) 854 40005-09
Cirebon (0231) 480 231, 480 232
Semarang (024) 761 6850-54
Solo (0271) 827 616-17
Yogyakarta (0274) 624231
Surabaya (031) 843 9839
Malang (0341) 417 350, 417 345

Denpasar (0361) 414 422, 414 433
Kupang (0380) 826 779
Banda Aceh (0651) 637 727
Medan (061) 664 1538
Jambi (0741) 411 97
Padang (0751) 220 17, 220 19
Pekanbaru (0761) 705538
Palembang (0711) 719 139-41
Bandar Lampung (0721) 707910-12, 7494952
Makasar (0411) 516 100, 516 068

Manado (0431) 853 140, 850 885
Samarinda (0541) 274 718, 273 100
Banjarasin (0511) 749 6446, 749 5446
Pontianak (0561) 721825, 722377
Jayapura (0967) 531 532, 536 284
Batam (0778) 472 049, 472 051
Jember (0331) 412901, 412902
Palu (0451) 425 457, 456 067